


Système de gestion de l'insuline Omnipod DASH[®]

Guide de référence rapide à l'intention des Podders^{MC}



Comment administrer un bolus

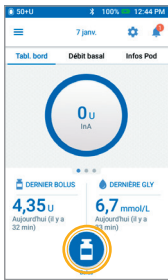


1. Appuyez sur le bouton Bolus dans l'écran d'accueil



2. Entrez les grammes de glucides (si vous mangez)
 • Appuyez sur « ENTRER LA GLY »



3. Entrez la valeur de la glycémie manuellement
 • Appuyez sur « CALCUL BOLUS »

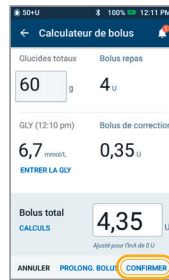

4. Appuyez sur « CONFIRMER » après avoir passé en revue les valeurs entrées



5. Appuyez sur « DÉMARRER » pour commencer l'administration du bolus

Rappel


L'écran d'accueil affiche une barre de progression et des détails tout au long de l'administration d'un bolus immédiat. Vous ne pouvez pas utiliser votre GPD pendant l'administration d'un bolus immédiat.



Comment définir un débit basal temporaire




1. Appuyez sur l'icône du menu dans l'écran d'accueil

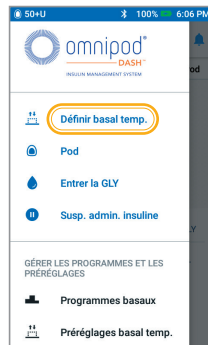

2. Sélectionnez « Définir basal temp. »




3. Appuyez sur la case Débit basal et entrez la modification en pourcentage
 • Appuyez sur la case Durée et entrez la durée
 • Ou appuyez sur « SÉLECTIONNER DEPUIS LES PRÉRÉGLAGES » (si vous avez enregistré les préréglages)

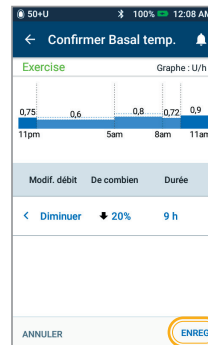


4. Appuyez sur « ENREG. » une fois que vous avez examiné les valeurs entrées

Le saviez-vous?


- L'onglet Basal temp. est surligné en vert lorsqu'un débit basal temporaire est actif
- Si un bandeau vert contenant un message de confirmation s'affiche, vous pouvez le balayer vers la droite pour le faire disparaître plus tôt

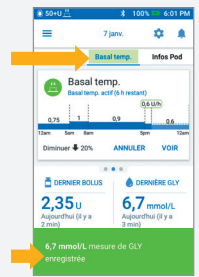


Suspendre et reprendre l'administration d'insuline

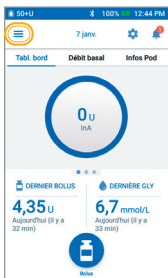


1. Appuyez sur l'icône du menu dans l'écran d'accueil

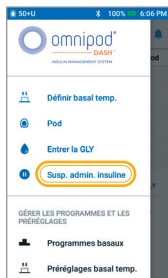


2. Appuyez sur « Susp. admin. insuline »

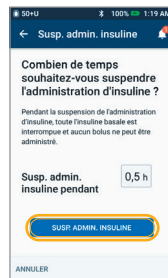

3. Faites défiler jusqu'à la durée pendant laquelle vous souhaitez suspendre l'administration d'insuline
 • Appuyez sur « SUSP. ADMIN. INSULINE »
 • Appuyez sur « Oui » pour confirmer que vous voulez suspendre l'administration d'insuline

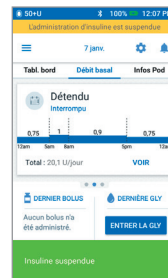

4. L'écran d'accueil affiche une bannière jaune indiquant que l'administration d'insuline est suspendue

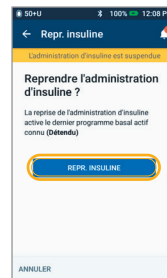

5. Appuyez sur « REPR. INSULINE » pour reprendre l'administration d'insuline

Rappel


- Vous DEVEZ reprendre l'administration d'insuline. Elle ne reprend pas automatiquement à la fin de la période de suspension
- Le Pod émet un bip toutes les 15 minutes pendant la période de suspension pour vous rappeler que l'insuline n'est pas administrée
- Vos débits basaux temporaires et vos bolus prolongés sont annulés lorsque l'administration d'insuline est suspendue

Système de gestion de l'insuline Omnipod DASH®

Guide de référence rapide à l'intention des Podders^{MC}



Comment remplacer un Pod

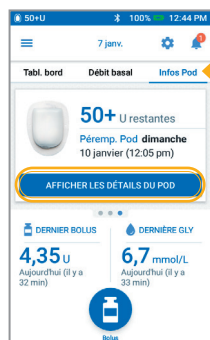


1. Appuyez sur « Infos Pod » sur l'écran d'accueil
- Appuyez sur « AFFICHER LES DÉTAILS DU POD »



2. Appuyez sur « CHANGER LE POD »
- Suivez attentivement les instructions à l'écran
- Le Pod sera désactivé



3. Appuyez sur « CONFIGURER UN NOUVEAU POD »

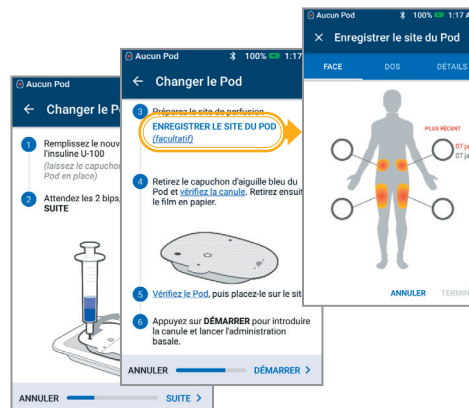

4. Suivez attentivement les instructions à l'écran

Pour obtenir des instructions plus détaillées, consultez le guide de l'utilisateur du système de gestion de l'insuline Omnipod DASH®.


N'oubliez pas!

- Laissez le Pod dans son plateau de plastique pendant le remplissage et l'amorçage
- Placez le Pod et le GPD l'un à côté de l'autre pour qu'ils se touchent pendant l'amorçage
- Enregistrez le site du Pod et assurez-vous de bien faire la rotation de vos sites d'application

Comment afficher les historiques d'insuline et de glycémie




1. Appuyez sur l'icône du menu dans l'écran d'accueil

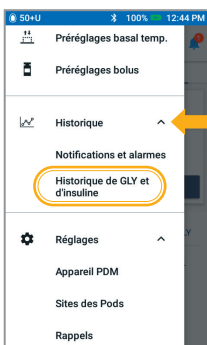

2. Appuyez sur « Historique » pour afficher la liste
- Appuyez sur « Historique de GLY et d'insuline »



3. Appuyez sur la flèche déroulante des jours pour consulter l'historique d'une ou de plusieurs journées

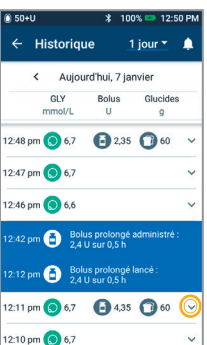

4. Continuez de balayer l'écran vers le haut pour voir la section des détails
- Appuyez sur la flèche déroulante pour afficher plus de détails

Un historique à portée de main!

- Information sur la glycémie :
 - Glycémie moyenne
 - Glycémie dans l'intervalle cible
 - Glycémie au-dessus et en dessous de l'intervalle cible
 - Nombre moyen de mesures par jour
 - Nombre total de mesures (pour cette journée ou cette plage de dates)
 - Glycémie la plus élevée et la plus basse
- Information sur l'insuline :
 - Insuline totale
 - Moyenne de l'insuline totale (pour la plage de dates)
 - Insuline basale
 - Bolus d'insuline
 - Total des glucides
- Événements relatifs au GPD ou au Pod :
 - Bolus prolongé
 - Activation/réactivation d'un programme basal
 - Début/fin/annulation d'un débit basal temporaire
 - Activation et désactivation d'un Pod

Le présent Guide de référence rapide à l'intention des Podders^{MC} doit être utilisé conjointement avec votre plan de prise en charge du diabète, les recommandations de votre professionnel de la santé et le guide de l'utilisateur du système de gestion de l'insuline Omnipod DASH®. Les images du gestionnaire personnel de diabète sont fournies à titre d'illustration seulement et ne doivent pas être considérées comme des suggestions de réglages par l'utilisateur.

Consultez le guide de l'utilisateur du système de gestion de l'insuline Omnipod DASH® pour obtenir toute l'information sur la façon d'utiliser le système Omnipod DASH®, ainsi que les mises en garde et les avertissements qui y sont liés. Vous pouvez vous procurer le guide de l'utilisateur du système de gestion de l'insuline Omnipod DASH® en ligne en vous rendant à l'adresse Omnipod.com ou par téléphone en appelant le service d'assistance à la clientèle (en tout temps) au 1-855-POD-INFO (763-4636).

Le présent Guide de référence rapide à l'intention des Podders^{MC} s'applique au modèle de gestionnaire personnel de diabète PDM-CAN-D001-MM. Le numéro de modèle du gestionnaire personnel de diabète est inscrit sur le couvercle à l'arrière de l'appareil.

© 2021 Insulet Corporation. Omnipod, le logo Omnipod, Simplify Life, DASH et le logo DASH sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Insulet Corporation aux États-Unis ou dans d'autres territoires. Tous droits réservés. La lettre de marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Insulet Corporation est soumise à une licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux appartiennent à leur propriétaire respectif. INS-ODS-02-2021-00072 v1.0