


# Podpals™, das selbstklebende Tape für aktive Tage

Wünschen Sie sich zusätzliche Unterstützung für die wärmeren Monate, beim Sport oder im Wasser? Dann haben wir etwas für Sie. Testen Sie die PodPals™, ein selbstklebendes Tape für den Pod, das von den Herstellern des Omnipod® Insulin-Managementsystem entwickelt wurde!

**FLEXIBLES DESIGN**

**MEDIZINISCHE QUALITÄT**

**GENAU AUF DEN POD ANGEPASST**

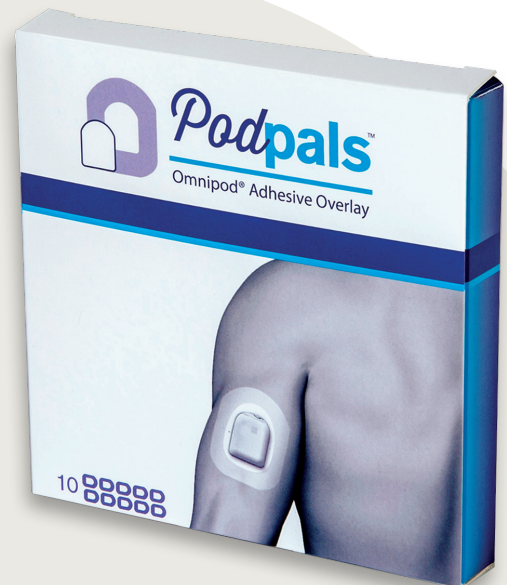

**ZUR BESTELLUNG: RUFEN SIE EINFACH DAS INSULET KUNDENDIENST-TEAM AN: 0800 89 76 18† ODER +41 44 585 9019† AUS DEM AUSLAND. ERREICHBAR TÄGLICH RUND UM DIE UHR.**




† Anrufe können zur Überwachung der Qualität mitgehört und aufgezeichnet werden.


Anrufe an 0800-Nummern sind aus dem Festnetz kostenlos. Bei Anrufen aus anderen Netzen können Kosten dafür entstehen.

# Gebrauchsanweisung für PodPals™


PodPals™ sind als Zubehör vorgesehen, das die Haftungsfähigkeit des Haftungsbereichs der Haut um den Pod herum unterstützen soll, während das Omnipod®- oder Omnipod DASH®-System verwendet wird.

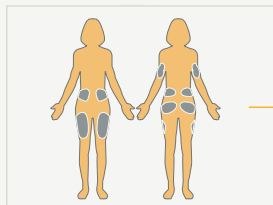


1 > Beginnen Sie mit einem aktiven Pod an einer geeigneten Stelle.

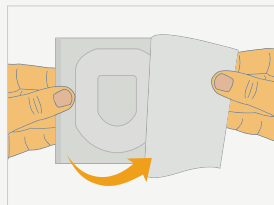


2 > Öffnen Sie die Verpackung, indem Sie die Laschen auseinanderziehen.

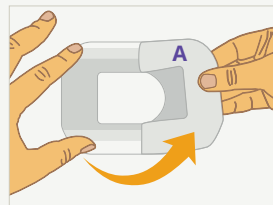


3 > Ziehen Sie die oberste Schicht des Papiers auf der Rückseite ab und entfernen Sie diese vollständig (A).

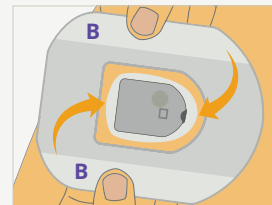


4 > Vergewissern Sie sich, dass die selbstklebende Seite nach unten zeigt, und bringen Sie das PodPal über dem Pod an. Achten Sie darauf, die Klebeseite nicht zu berühren. Halten Sie stattdessen das Papier auf der Rückseite (B). Dehnen Sie das PodPal nicht vor oder während der Anwendung.

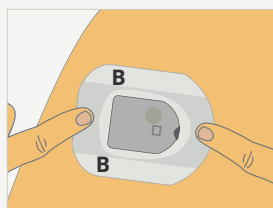


5 > Bevor Sie das PodPal nach unten drücken, um es zu befestigen, stellen Sie sicher, dass es alle Kanten des Pod-Klebspolsters, aber keinen Teil des Pods bedeckt, insbesondere nicht das Sichtfenster der Kanüle.

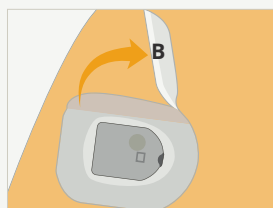

6 > Ziehen Sie vorsichtig auf beiden Seiten das Papier auf der Rückseite (B) ab.

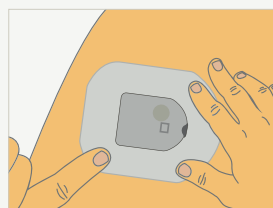

7 > Drücken Sie alle Ränder fest, um das PodPal an der Haut und dem Klebspolster des Pods zu befestigen. Achten Sie darauf, alle Falten zu glätten.

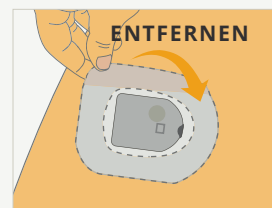

8 > Wenn Sie das PodPal entfernen möchten, lösen Sie vorsichtig die Kanten und ziehen Sie es von der Haut ab. Entfernen Sie zuerst das PodPal und dann den Pod.

## HINWEISE ZUR ANWENDUNG

- > Stellen Sie sicher, dass die Anwendungsstelle vor dem Anbringen sauber und vollständig trocken ist. Vermeiden Sie die Verwendung von Körperlotionen, Cremes oder Ölen, da diese Produkte den Kleber lösen können.
- > Drücken Sie das PodPal nach dem Anbringen fest und halten Sie es ca. 30 Sekunden lang gedrückt, um eine maximale Haftung sicherzustellen.

- > Drücken Sie das Tape nach unten und glätten Sie es bei Bedarf, um Falten zu vermeiden.
- > Wenn Sie Ihr PodPal an einer schwer zugänglichen Stelle anbringen möchten, ist möglicherweise Unterstützung erforderlich.
- > Nach dem Anbringen muss das PodPal für den Zeitraum der Pod-Tragedauer auf der Haut verbleiben.

