


Podpals™, patch adhésif pour vos journées actives.

Vous avez besoin d'une aide supplémentaire pendant les mois plus chauds, les activités sportives ou aquatiques ? Comptez sur nous. Essayez PodPals™, un patch adhésif pour le Pod développé par les créateurs du système de gestion d'insuline Omnipod® !


CONCEPTION FLEXIBLE
QUALITÉ MÉDICALE
SPÉCIFIQUEMENT ADAPTÉ AU POD

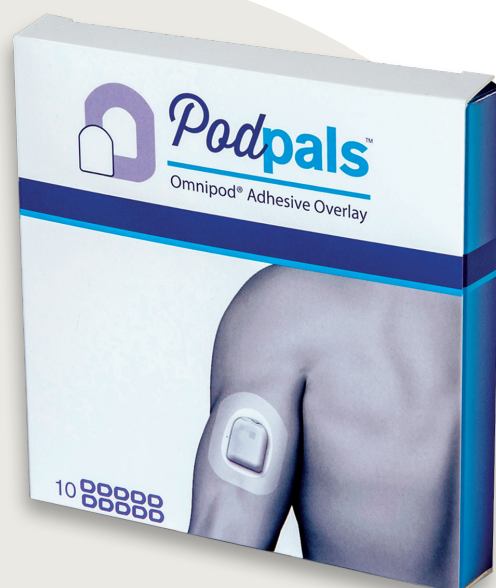


**VOUS SOUHAITEZ PLUS D'INFORMATIONS ET DÉCOUVRIR LE
PATCH ADHÉSIF PODPAL ? CONTACTEZ VOTRE PRESTATAIRE
DE SANTÉ À DOMICILE.**

Instructions d'utilisation de PodPals™


Les PodPals™ sont des accessoires qui peuvent être utilisés pour contribuer à l'adhérence de la zone de fixation sur la peau entourant le Pod lors de l'utilisation du système Omnipod® ou Omnipod DASH®.

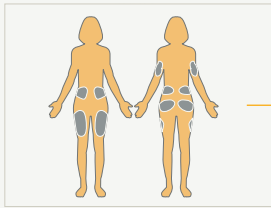


1 > Commencez avec un Pod actif situé sur une zone d'application appropriée.

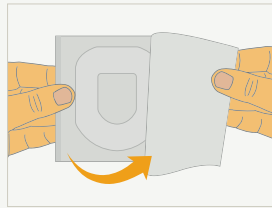


2 > Ouvrez l'emballage en tirant sur les languettes.

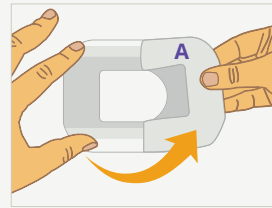


3 > Décollez et enlevez complètement la couche supérieure du film en papier (A).

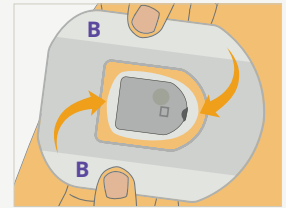


4 > Avec le côté collant vers le bas, placez le PodPal sur le Pod. Évitez de toucher l'adhésif. Tenez-le en utilisant le film en papier (B). Évitez d'étirer le PodPal avant ou pendant son application.

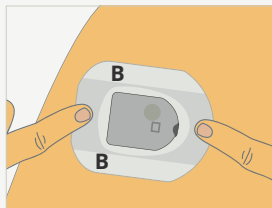


5 > Avant d'appuyer pour installer fermement le PodPal, assurez-vous qu'il recouvre tous les bords du tampon adhésif du Pod et qu'il ne recouvre aucune partie du Pod, en particulier la fenêtre de visualisation de la canule.

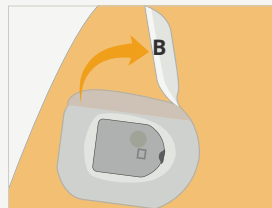

6 > Décollez délicatement le film en papier (B) des deux côtés.

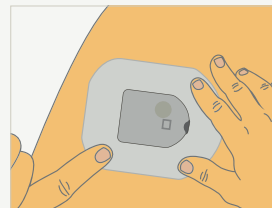

7 > Exercez une pression sur toutes les zones pour faire adhérer le PodPal à la peau et au tampon adhésif du Pod. Lissez les plis éventuels.

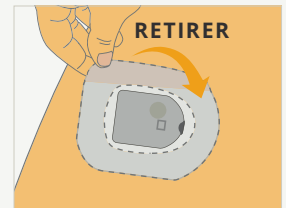

8 > Une fois que vous êtes prêt(e) à retirer le PodPal, soulevez doucement les bords et décollez-le de la peau. Retirez d'abord le PodPal, puis le Pod.

CONSEILS D'UTILISATION

- > Faites en sorte que la peau à l'endroit où vous allez placer le PodPal soit propre et bien sèche avant l'application. Évitez d'utiliser des lotions, des crèmes ou des huiles pour le corps, car ces produits risquent de décoller l'adhésif.
- > Pour une adhésion maximale, appuyez sur le PodPal et continuez à exercer une pression pendant 30 secondes après l'application.

- > Exercez une pression et lissez la couche supérieure si besoin pour éviter les petits plis.
- > Si vous appliquez le PodPal dans une zone difficile d'accès, une assistance peut être nécessaire.
- > Une fois appliqué, le PodPal doit rester en place pour la durée de vie du Pod.

