

Devenez un Podder™

en trois petites étapes.

Chers nouveaux utilisateurs du système Omnipod®, veuillez effectuer le processus de réglage avec votre médecin ou votre formateur Pod qualifié.



NAVIGATION DANS L'ASSISTANT DE RÉGLAGE

- + Utilisez les touches de défilement haut/bas sur votre Personal Diabetes Manager (Gestionnaire personnel de diabète ou PDM) pour augmenter ou diminuer un nombre ou pour vous déplacer vers le haut ou le bas d'une liste.
- + Appuyez sur la touche de fonction libellée Suite, Sélection, Confirm, Enregist ou Termin pour passer à l'écran suivant.
- + Appuyez sur la touche de fonction libellée Retour ou Annuler pour revenir à l'écran précédent.

La fonction de chaque touche de fonction s'affiche à l'écran, au-dessus de chaque bouton.




Les affichages ci-dessus représentent un petit exemple de ces fonctions. Les affichages du PDM peuvent varier en fonction de la configuration de l'utilisateur.

SAISIE DE VOS RÉGLAGES

Il est très important d'entrer très précisément vos réglages dans votre nouveau PDM*. Appliquez à la lettre les instructions de ce guide de démarrage rapide. Consultez votre guide de l'utilisateur du système Omnipod® si vous avez besoin d'informations supplémentaires.

Si vous avez des questions sur le réglage de votre nouveau PDM, veuillez contacter le service clients. Nous sommes joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au 0800 89 76 18. Si vous avez des questions sur vos réglages individuels du traitement par pompe, veuillez contacter votre médecin.

* Le PDM n'est pas étanche.

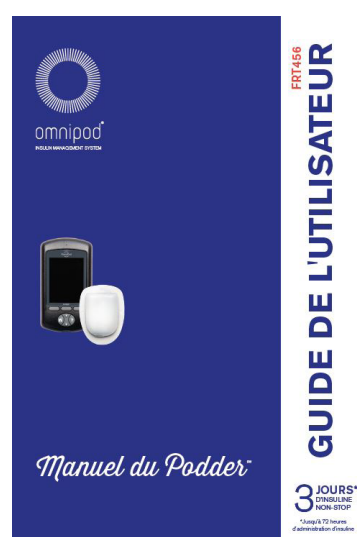

1 RÉGLAGE DE VOTRE PDM

Réglez votre Personal Diabetes Manager (Gestionnaire personnel de diabète ou PDM) à l'aide de l'assistant de réglage du système Omnipod®.

Pour cette étape, nous allons avoir besoin d'une horloge précise, comme votre montre, votre réveil ou votre téléphone portable. Vous devrez également entrer des réglages personnels dans le nouveau PDM.

- + Si vous êtes déjà un utilisateur du système Omnipod®, récupérez ces réglages dans votre PDM actuel.
- + Si vous êtes un nouvel utilisateur du système Omnipod®, vous devez suivre le processus de réglage avec votre médecin ou un formateur Pod qualifié.


- 1 Insérez les piles AAA livrées avec votre PDM dans le compartiment des piles situé au dos du PDM.



- 2 L'assistant de réglage apparaît la première fois que vous allumez votre PDM.

Il vous guidera tout au long du processus de réglage. Suivez les instructions de chaque écran pour régler :

- + Votre nom d'identification : le nom que vous utiliserez pour identifier votre PDM
- + La couleur de votre écran d'identification : vous pouvez choisir blanc, vert, bleu, orange ou violet
- + La date et l'heure actuelles
- + Le débit basal maximum
- + Le débit et/ou le programme basal initial
- + La méthode de débit basal temporaire
- + Le réglage sonore de la glycémie sanguine et des objectifs glycémiques
- + Les calculs du bolus suggéré et les objectifs, ratios et facteurs associés (le cas échéant)
- + L'incrément bolus
- + Le bolus maximum
- + La méthode de bolus prolongé
- + L'indicateur de réservoir bas
- + La notification de péremption du Pod

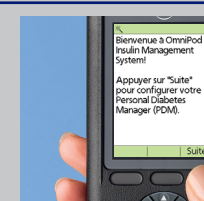

2

ACTIVATION D'UN NOUVEAU POD

Une fois votre PDM réglé, il vous demandera si vous voulez activer un Pod. Suivez les instructions de votre PDM pour activer un nouveau Pod.

- Munissez-vous des éléments suivants :
 - + PDM
 - + Pod non ouvert
 - + Compresses imprégnées d'alcool prêtes à l'emploi
 - + Flacon d'insuline U-100 à action rapide à température ambiante



- Lavez-vous les mains à l'eau et au savon. Nettoyez le haut du flacon d'insuline à l'aide d'une compresse imprégnée d'alcool prête à l'emploi.

- Retirez l'aiguille de remplissage et la seringue de l'emballage du Pod. Tournez l'aiguille de remplissage dans le sens horaire, sur le haut de la seringue. N'utilisez aucun type d'aiguille ou dispositif de remplissage autre que la seringue livrée avec chaque Pod.



- Retirez le capuchon de protection de l'aiguille de la seringue. Aspirez un volume d'air dans la seringue égal au volume d'insuline à utiliser. Vous devez remplir votre seringue avec au moins 85 unités d'insuline. Insérez l'aiguille dans le flacon et injectez l'air.



- Renversez doucement le flacon dont vous allez lentement prélever l'insuline. Tapotez la seringue remplie pour éliminer les bulles éventuelles.



- Retirez l'aiguille du flacon et insérez-la dans l'orifice de remplissage du Pod. Une flèche figurant sur le film en papier blanc désigne l'orifice de remplissage. N'injectez l'insuline à aucun autre endroit sur le Pod. Laissez le Pod sur le plateau pendant que vous le remplissez d'insuline.

! Pour assurer un remplissage correct, n'inclinez pas la seringue de remplissage dans l'orifice de remplissage.

- Injectez l'insuline dans l'orifice de remplissage. Le Pod émet alors deux tonalités. Retirez l'aiguille de l'orifice de remplissage en insuline. Remplacez le capuchon de protection sur l'aiguille et retirez celle-ci de la seringue de remplissage.



! N'injectez JAMAIS d'air dans l'orifice de remplissage. Le non-respect de cette consigne peut déclencher une administration accidentelle ou interrompre une injection d'insuline.

! N'utilisez JAMAIS un Pod si vous sentez une résistance lorsque vous appuyez sur le piston de la seringue de remplissage. Ce blocage peut interrompre une injection d'insuline.

- Placez le Pod dans le plateau sur la droite du PDM et en contact avec celui-ci pour assurer une bonne communication. Appuyez sur Suite sur le PDM. Le système Omnipod® effectue une série de vérifications de sécurité et amorce automatiquement le Pod.



3

DÉMARRAGE DE L'ADMINISTRATION D'INSULINE

Suivez les instructions de votre PDM pour commencer l'administration d'insuline.

- Relisez la notice de placement du Pod ou le guide de l'utilisateur du système Omnipod® afin de décider où placer votre Pod. Lavez-vous les mains à l'eau et au savon. Utilisez une compresse imprégnée d'alcool prête à l'emploi pour nettoyer le site. Laissez le site bien sécher à l'air. Ne soufflez pas sur le site pour le sécher.



- Retirez le capuchon d'aiguille en plastique transparent du dessous du Pod lorsque le PDM vous le demande. Tirez fermement vers le haut le bord le plus extérieur.



- Retirez le film en papier blanc de la bande adhésive. Si le Pod est mouillé ou sale ou que le film adhésif est plié, appuyez sur Abandonner sur le PDM et recommencez avec un nouveau Pod.



- Appliquez le Pod sur le site choisi une fois que vous avez vérifié que le Pod est OK. Passez votre doigt sur le bord adhésif pour qu'il colle bien. Appuyez sur Suite sur le PDM.



- Appuyez sur Démarrer sur le PDM. L'aiguille est insérée afin de placer une canule sous la peau. Vous allez entendre un clic et sentir un léger pincement.



- Regardez dans la fenêtre d'inspection du Pod pour vérifier la canule. Vérifiez le site de perfusion afin de vous assurer que la canule est correctement insérée.

- Vérifiez la surface du Pod ; vous devez maintenant pouvoir voir le marqueur rose dans la fenêtre, sur le haut. Si la canule est mal insérée, appuyez sur Non sur le PDM. Appuyez sur Abandonner pour désactiver le Pod et recommencez le processus avec un nouveau Pod. Si la canule est correctement insérée, appuyez sur Oui sur le PDM.



- Vérifiez votre glycémie sanguine 90 minutes après l'activation du Pod. Votre PDM affichera un rappel pour cette vérification. Il vous rappellera également de vérifier le site de perfusion afin de vous assurer que la canule est correctement insérée. Une fois ces vérifications effectuées, appuyez sur OK sur le PDM.

! Avant de poursuivre avec le système de gestion de l'insuline du système Omnipod®, consultez votre guide de l'utilisateur pour obtenir des instructions d'utilisation détaillées.




19141-EG-AW Rév. A 12/17

© 2017 Insulet Corporation. Omnipod, Podder et le logo Omnipod sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Insulet Corporation aux États-Unis et dans diverses juridictions. Tous droits réservés.

Informations relatives aux brevets aux États-Unis disponibles sur le site www.insulet.com/patents.

FreeStyle et les autres marques associées sont des marques commerciales d'Abbott Diabetes Care Inc. dans diverses juridictions et sont utilisées sous autorisation.

Toutes les photos sont celles de véritables utilisateurs du système Omnipod®.

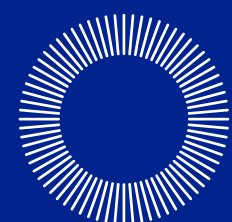

omnipod®
INSULIN MANAGEMENT SYSTEM



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Système de gestion de l'insuline