

BIENVENIDO AL
SISTEMA AUTOMATIZADO DE
ADMINISTRACIÓN DE INSULINA

Omnipod[®] 5



Guía de transferencia de ajustes





PARA USUARIOS ACTUALES DE
Omnipod DASH[®]

Ajustes

Muchos de los ajustes de tu Sistema Omnipod DASH son similares a los del Omnipod 5. Pero, es importante recordar que debido a que Omnipod 5 es un sistema automatizado de administración de insulina, funciona de manera diferente al Sistema Omnipod DASH. Por ello, es muy importante que tengas en cuenta tus ajustes actuales y que te comuniques con tu proveedor de atención médica antes de empezar. Encuentra tus ajustes actuales siguiendo las instrucciones que aparecen a continuación. **Escribe tus ajustes actuales en la tabla de la página 5.**

Ajustes Basales




1. Desde la pantalla de Inicio, toca el icono de Menú



2. Toca **Programas Basales**



3. Toca «**EDITAR**» para ver el programa basal. Si tienes un Pod activo, tendrás que tocar **DETENER INSULINA** para ver el programa basal activo. Revisa el nombre/la etiqueta del programa. Toca **SIGUIENTE**.

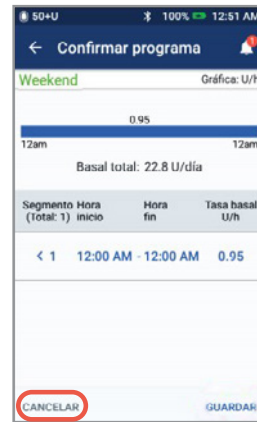


4. Revisa y anota los segmentos basales, tus tasas y la cantidad basal total que se encuentra en esta pantalla. Desplázate hacia abajo para incluir todos los segmentos para las 24 horas del día. Toca **CANCELAR**. Si has detenido la insulina, deberás tocar **REANUDAR INSULINA** para reiniciar la administración basal.


Ajustes Basales – Basal Máx. y Basal Temporal



1. Desde la pantalla de Inicio, toca el icono de Menú

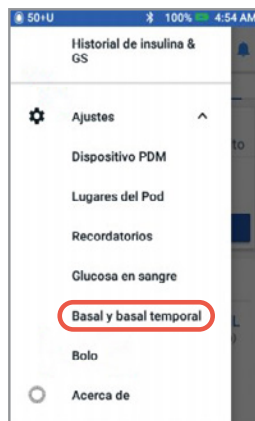

2. Toca en **Basal y Basal Temporal**

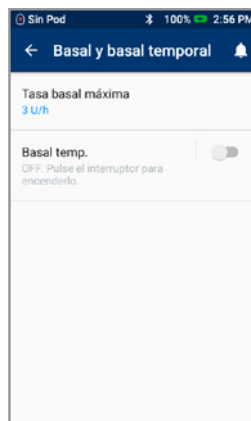

3. Revisa y anota la Tasa Basal Máxima. Anota si tu Basal Temporal está **ACTIVADO** o **DESACTIVADO**.


Ajustes (cont.)

Escribe tus ajustes actuales en la tabla de la siguiente página.


Ajustes de Bolo




1. Desde la pantalla de Inicio, toca el icono de Menú

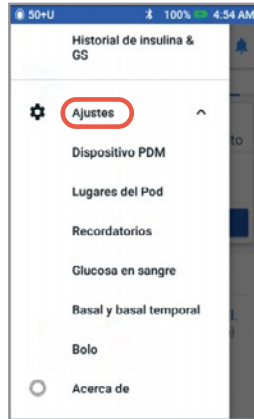

2. Toca **Ajustes** para expandir la lista. Toca en **Bolo**.

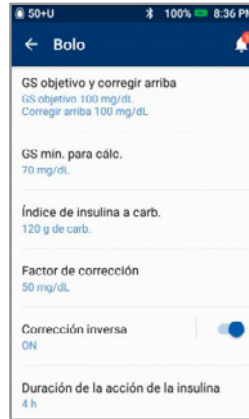


3. Toca en cada ajuste de Bolo. Por ejemplo, toca en GS Objetivo y Corregir Sobre.

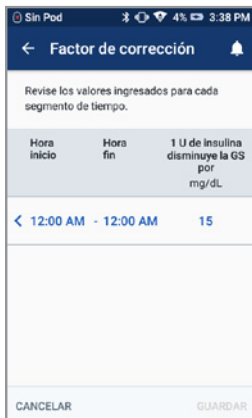

4. Revisa y anota tus valores de GS Objetivo y Corregir Sobre.



5. Revisa y anota tu Proporción de Insulina a Carbohidratos.

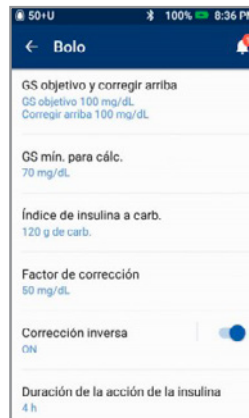

6. Continúa revisando y anotando tus ajustes de Factor de Corrección, Corrección Inversa, Duración de la Acción de la Insulina, Bolo Máximo y Bolo Extendido

Primero, debes confirmar tus ajustes iniciales con tu proveedor de atención médica. A continuación, sigue las instrucciones paso a paso durante la Configuración Inicial para ingresar los ajustes iniciales en la Aplicación Omnipod 5. Consulta con tu proveedor de atención médica después de empezar a usar el Omnipod 5, ya que es posible que algunos ajustes deban modificarse.

Ajustes actuales:

AJUSTES DE LA BOMBA INICIALES	
AJUSTES BASALES	
Tasa Basal Máxima = _____ U/h	Tasas Basales 12:00 a. m. - _____ = _____ U/h _____ - _____ = _____ U/h _____ - _____ = _____ U/h _____ - _____ = _____ U/h
Basal Temporal (marca una opción con un círculo) ACTIVADO o DESACTIVADO	
AJUSTES DE BOLO	
Glucosa Objetivo (<i>selecciona una Glucosa Objetivo para cada segmento</i>) Corregir Sobre 12:00 a. m. - _____ = <input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 120 <input type="checkbox"/> 130 <input type="checkbox"/> 140 <input type="checkbox"/> 150 mg/dL _____ mg/dL _____ - _____ = <input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 120 <input type="checkbox"/> 130 <input type="checkbox"/> 140 <input type="checkbox"/> 150 mg/dL _____ mg/dL _____ - _____ = <input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 120 <input type="checkbox"/> 130 <input type="checkbox"/> 140 <input type="checkbox"/> 150 mg/dL _____ mg/dL _____ - _____ = <input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 120 <input type="checkbox"/> 130 <input type="checkbox"/> 140 <input type="checkbox"/> 150 mg/dL _____ mg/dL <i>(La Glucosa Objetivo es el valor ideal de glucosa deseado. Corregir Sobre es el valor de glucosa por encima del que se desea el bolo de corrección.)</i>	
Proporción de Insulina a Carbohidratos 12:00 a. m. - _____ = _____ g/unidad _____ - _____ = _____ g/unidad _____ - _____ = _____ g/unidad _____ - _____ = _____ g/unidad	Factor de Corrección 12:00 a. m. - _____ = _____ mg/dL/unidad _____ - _____ = _____ mg/dL/unidad _____ - _____ = _____ mg/dL/unidad _____ - _____ = _____ mg/dL/unidad
Duración de la Acción de la Insulina _____ h	Bolo Máximo = _____ unidades
Bolo Extendido (marca una opción con un círculo) ACTIVADO o DESACTIVADO	




PARA USUARIOS ACTUALES DEL
Sistema Omnipod


Ajustes

Muchos de los ajustes de tu Sistema Omnipod son similares a los del Omnipod 5. Pero, es importante recordar que debido a que Omnipod 5 es un sistema automatizado de administración de insulina, funciona de manera diferente al Sistema Omnipod. Por ello, es muy importante que tengas en cuenta tus ajustes actuales y que te comuniques con tu proveedor de atención médica antes de empezar. Encuentra tus ajustes actuales siguiendo las instrucciones que aparecen a continuación. **Escribe tus ajustes actuales en la tabla de la siguiente página.**


Ajustes Basales

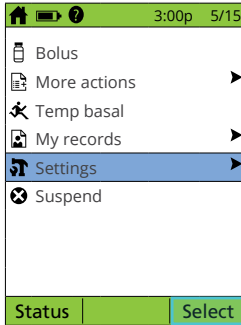


1. Selecciona **Settings (Ajustes)** en la pantalla de inicio

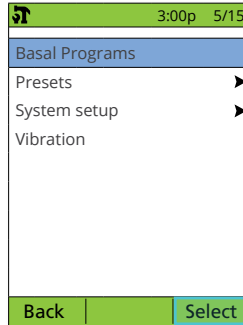

2. Selecciona **Basal Programs (Programas Basales)**

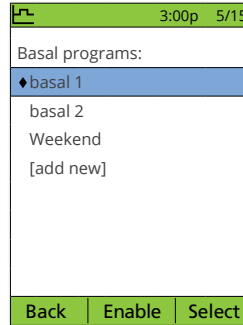


3. Selecciona el programa basal que quieres revisar. En la siguiente pantalla, selecciona **View (Ver)**.

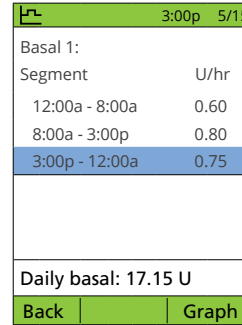


4. Primero verás el gráfico, presiona **List (Lista)** para ver y anotar tus segmentos basales como se muestra.


Ajustes de Bolo

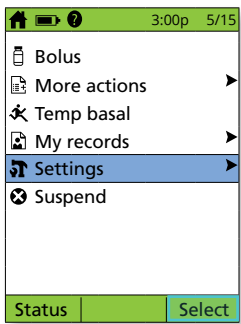


1. Selecciona **Settings (Ajustes)** en la pantalla de inicio

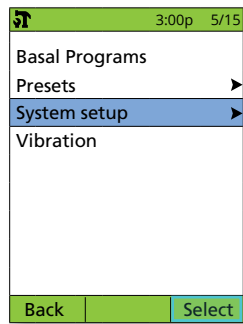


2. Selecciona **System setup (Configuración del sistema)**

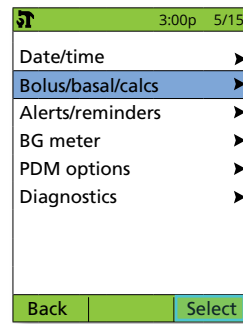

3. Selecciona **System setup (Configuración del sistema)**

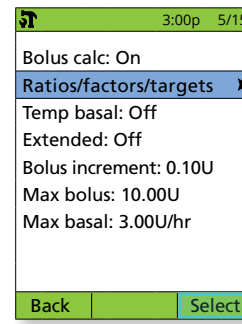

4. Revisa y anota los ajustes de Basal Temporal, Extendido, Bolo Máximo y Basal Máximo. Después, selecciona **Ratios/factors/targets (Proporciones/factores/objetivos)**.

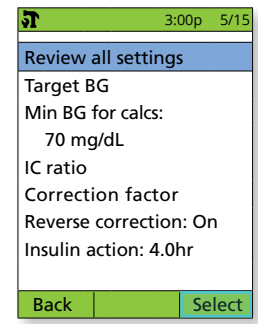

5. Selecciona **Review all Settings (Revisar todos los ajustes)**. Revisa y anota GS Objetivo, Proporción de IC, Factor de Corrección, Corrección Inversa y Acción de la Insulina.

Primero, debes confirmar tus ajustes iniciales con tu proveedor de atención médica. A continuación, sigue las instrucciones paso a paso durante la Configuración Inicial para ingresar los ajustes iniciales en la Aplicación Omnipod 5. Consulta con tu proveedor de atención médica después de empezar a usar el Omnipod 5, ya que es posible que algunos ajustes deban modificarse.

Ajustes actuales:

AJUSTES DE LA BOMBA INICIALES	
AJUSTES BASALES	
Tasa Basal Máxima = _____ U/h	Tasas Basales 12:00 a. m. - _____ = _____ U/h _____ - _____ = _____ U/h _____ - _____ = _____ U/h _____ - _____ = _____ U/h
Basal Temporal (marca una opción con un círculo) ACTIVADO o DESACTIVADO	
AJUSTES DE BOLO	
Glucosa Objetivo (<i>selecciona una Glucosa Objetivo para cada segmento</i>) Corregir Sobre	
12:00 a. m. - _____ = <input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 120 <input type="checkbox"/> 130 <input type="checkbox"/> 140 <input type="checkbox"/> 150 mg/dL _____ mg/dL _____ - _____ = <input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 120 <input type="checkbox"/> 130 <input type="checkbox"/> 140 <input type="checkbox"/> 150 mg/dL _____ mg/dL _____ - _____ = <input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 120 <input type="checkbox"/> 130 <input type="checkbox"/> 140 <input type="checkbox"/> 150 mg/dL _____ mg/dL _____ - _____ = <input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 120 <input type="checkbox"/> 130 <input type="checkbox"/> 140 <input type="checkbox"/> 150 mg/dL _____ mg/dL	
<i>(La Glucosa Objetivo es el valor ideal de glucosa deseado. Corregir Sobre es el valor de glucosa por encima del que se desea el bolo de corrección.)</i>	
Proporción de Insulina a Carbohidratos 12:00 a. m. - _____ = _____ g/unidad _____ - _____ = _____ g/unidad _____ - _____ = _____ g/unidad _____ - _____ = _____ g/unidad	Factor de Corrección 12:00 a. m. - _____ = _____ mg/dL/unidad _____ - _____ = _____ mg/dL/unidad _____ - _____ = _____ mg/dL/unidad _____ - _____ = _____ mg/dL/unidad
Duración de la Acción de la Insulina _____ h	Bolo Máximo = _____ unidades
Bolo Extendido (marca una opción con un círculo) ACTIVADO o DESACTIVADO	

Atención al Cliente: 800-591-3455
Insulet Corporation, 100 Nagog Park, Acton, MA 01720, EE. UU.

El Sistema Automatizado de Administración de Insulina Omnipod 5 está indicado para su uso en personas mayores de 2 años con diabetes mellitus tipo 1. El sistema Omnipod 5 está diseñado para un solo paciente, uso doméstico y requiere receta médica. El Sistema Omnipod 5 es compatible con las siguientes insulinas U-100: NovoLog®, Humalog® y Admelog®.

Consulta la Guía del Usuario del Sistema Automatizado de Administración de Insulina Omnipod® 5 y www.omnipod.com/safety para conocer la información completa de seguridad, incluidas las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones e instrucciones. Advertencia: NO empieces a usar el Sistema Omnipod 5 ni cambies los ajustes sin la capacitación y orientación adecuadas de un proveedor de atención médica. Iniciar y modificar incorrectamente los ajustes puede causar la administración excesiva o insuficiente de insulina, lo que podría provocar hipoglucemia o hiperglucemia.

Consulta las Guías del Usuario del Sistema de Administración de Insulina Omnipod® y Omnipod DASH® para conocer la información completa de seguridad, incluidas las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones e instrucciones.

Descargo de responsabilidad médica: Este folleto es solo para fines informativos y no sustituye los consejos y servicios médicos de un proveedor de atención médica. No debe basarse de ninguna manera en este folleto para tomar decisiones relacionadas con la atención médica personal y el tratamiento. Debes consultar sobre todas esas decisiones y tratamientos con un proveedor de atención médica que esté familiarizado con tus necesidades personales.

©2023 Insulet Corporation. Omnipod, el logo de Omnipod, DASH, el logo de DASH, Simplifica la vida y el logo de Omnipod 5, son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Insulet Corporation. Todos los derechos reservados. La marca denominativa y los logos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y todo uso de dichas marcas por parte de Insulet Corporation se efectúa con licencia. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de marcas comerciales de terceros no constituye una recomendación ni implica una relación u otra afiliación. INS-OHS-09-2023-00035 v1.0

